


1 sats / 4 x

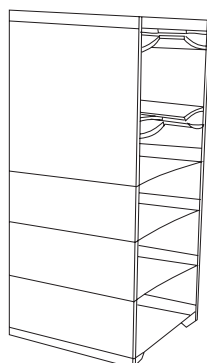

Gäller för följande modeller:
Victor art. nr. 10130, 10131

Passar:

Sängsockel 2.5 - 7.5 cm tjock och minimum 10 cm hög



Maxlast: 120 kg / sats

Max. förhöjning: 12 cm

Att tänka på vid användning av förhöjningsben:

Att förhöja möbler med extra tillsatser kan medföra en ökad risk för instabilitet. Tänk igenom situationen där förhöjningsbenen ska användas, särskilt med tanke på eventuell tippningsrisk. Om brukaren sätter/lägger sig ned okontrollerat så att möbelen kan förskjutas på golvet kan tippningsrisk uppstå. Beakta möbels placering och överväg behovet av extra stöd mot en eller två väggar. Förvissa dig om att förhöjningsbenet passar till den möbel som används. Iakttag försiktighet och omsorg vid användandet.

Viktigt:

Vid montering ska undersidan på socklarna vila i botten på samtliga förhöjningsben. En sockelhöjd på minst 10 cm krävs för korrekt montering.


Som utprovare och medhjälpare är du alltid ansvarig för brukarens säkerhet. Du måste vara informerad om brukarens möjligheter att klara situationen med det nya hjälpmedlet.

Kontrollera förhöjningsbenen regelbundet. Var särskilt uppmärksam på eventuella förskjutningar av socklar och förhöjningsben samt skador som kan ha uppkommit. Använd ej skadade förhöjningsben.


Kontakta Liko om oklarheter finns eller om frågor uppstår.

Montering:



1.

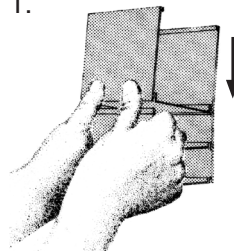

2.

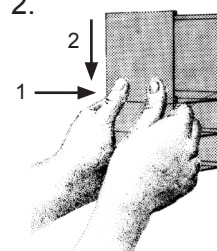

3.

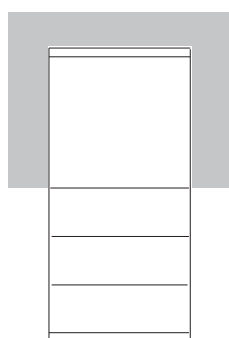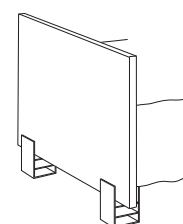


10 cm

12 cm

Demontering:

1.

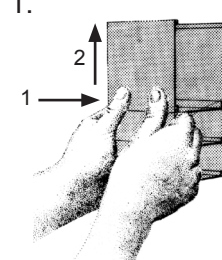

2.

